


Voortaan gebruikt u voor alle bepalingen de eSwab met roze dop (nummer 1).

NB: De eSwab met blauwe dop (nummer 2) alleen nog gebruiken voor afnames bij kleine kinderen.



1 eSwab roze dop

Stap 1:

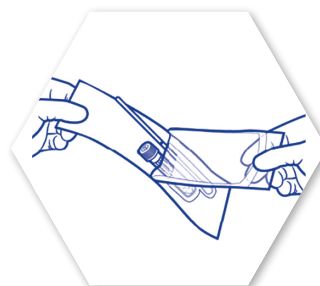

- Open de verpakking.
- Was voor de afname uw handen met water en zeep.
- Haal het wattenstokje en het buisje eruit.
LET OP; raak het witte watje niet aan!

Stap 2: Afname



- Neem het materiaal af bij de patient.
- **Voorkom het buigen van de Swab.**

Stap 3a: Na afname



- Draai de dop van de bijgeleverde buis.
- Stop het wattenstokje in het buisje.

Stap 3b:




- Breng het gekleurde streepje op het wattenstokje (breuklijn) op gelijke hoogte met de bovenrand.
- Zet het stokje tegen de rand van het buisje. Buig het uitstekende gedeelte en breek het stokje af.
- Gooi het uiteinde weg.

Stap 3c:



- Draai de dop weer op de buis (draai de dop minimaal 1 ¼ slag) waarbij de swab automatisch in de dop gevangen wordt.

Stap 4: Identificatie afnamebuis

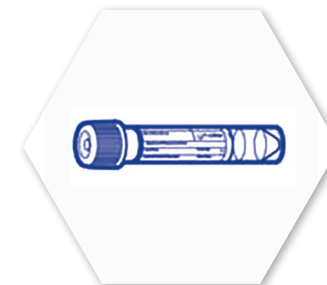

- Indien aanvraag via ZorgDomein, plak de barcode-sticker met patiënteninformatie op de buis. Zo niet, vul die in op de meegeleverde sticker en plak die op de buis.